




# Čistící krytí s obsahem chloridu sodného

Mesalt efektivně stimuluje čištění silně exsudujících a infikovaných ran

Absorpční viskózo-polyesterový  
netkaný materiál

- Impregnovaný chloridem sodným

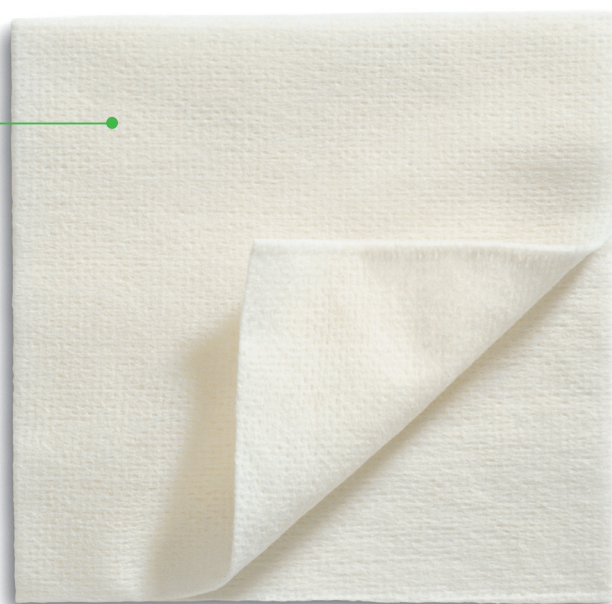

### Jak Mesalt funguje


Exsudát z rány uvolňuje z krytí chlorid sodný. Mesalt účinně podporuje čištění rány v zánětlivé fázi absorpcí exsudátu, včetně bakterií a nekrotického materiálu z rány. Tímto podporuje přirozený proces hojení.

### Oblasti použití


Mesalt byl navržen pro silně exsudující a exsudující infikované rány v zánětlivé fázi jako např.:

- Dekubity
- Chirurgické rány


### Jak Mesalt použít

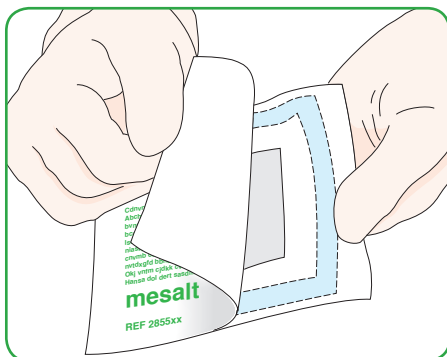

Vyčistěte ránu a otevřete obal.

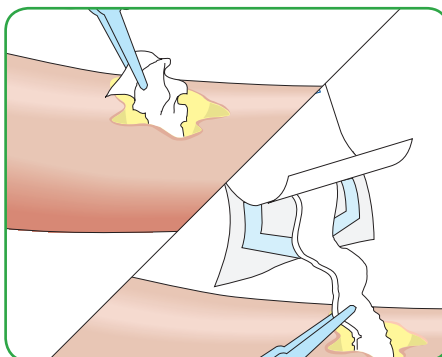

Přiložte Mesalt k ráně nebo volně vložte. Předem jej nenamáčejte.

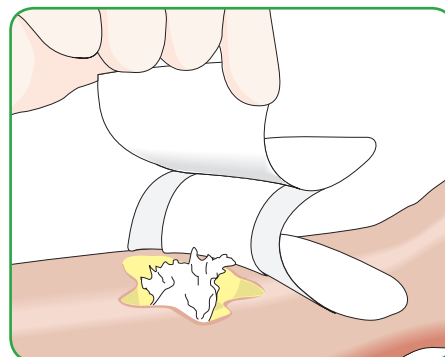

Přiložte Mepilex Border jako sekundární krytí. V závislosti na množství exsudátu se Mesalt mění denně, případně častěji.

### Výhody Mesaltu

- Podporuje proces čištění rány (Debridement)
- Snižuje množství patogenů v ráně
- Snadné použití

### Poznámka

Mesalt by neměl být používán na suché rány.



### Mesalt je sterilní, jednotlivě balený

Kód VZP	Číslo výrobku	Velikost/cm	KS v balení	Ks v kartonu
0080219	285580	5 x 5	30	240
0080220	285780	7,5 x 7,5	30	240
0080221	286080	10 x 10	30	240

Mölnlycke Health Care, s.r.o.  
Hájkova 2747/22, 130 00 Praha 3  
Tel. +420 221 890 517  
Fax +420 224 817 582  
www.molnlycke.com



MÖLNLYCKE  
HEALTH CARE

Symbol a značka slova jsou registrované obchodní značky společnosti Mölnlycke Health Care.